


Come usare

plexygon?

Preparazione

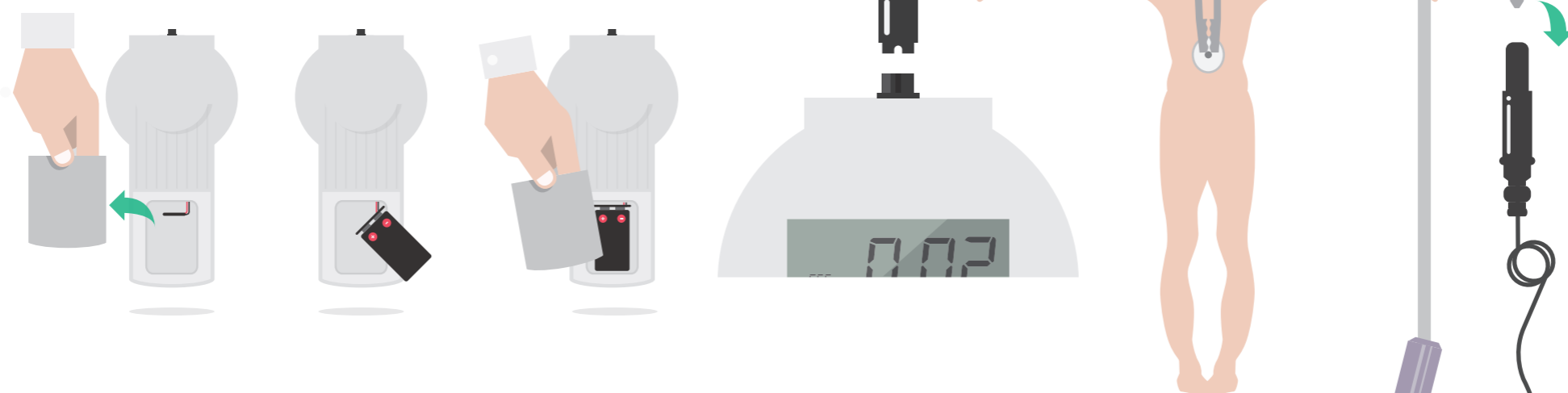

Uso standard




On/off

Premi μ S Mode per scegliere durata impulso (50-100-300 μ S)

Ruota l'encoder per modificare la corrente erogata

Altri settaggi

Per modificare durata, intensità, frequenza e sonoro

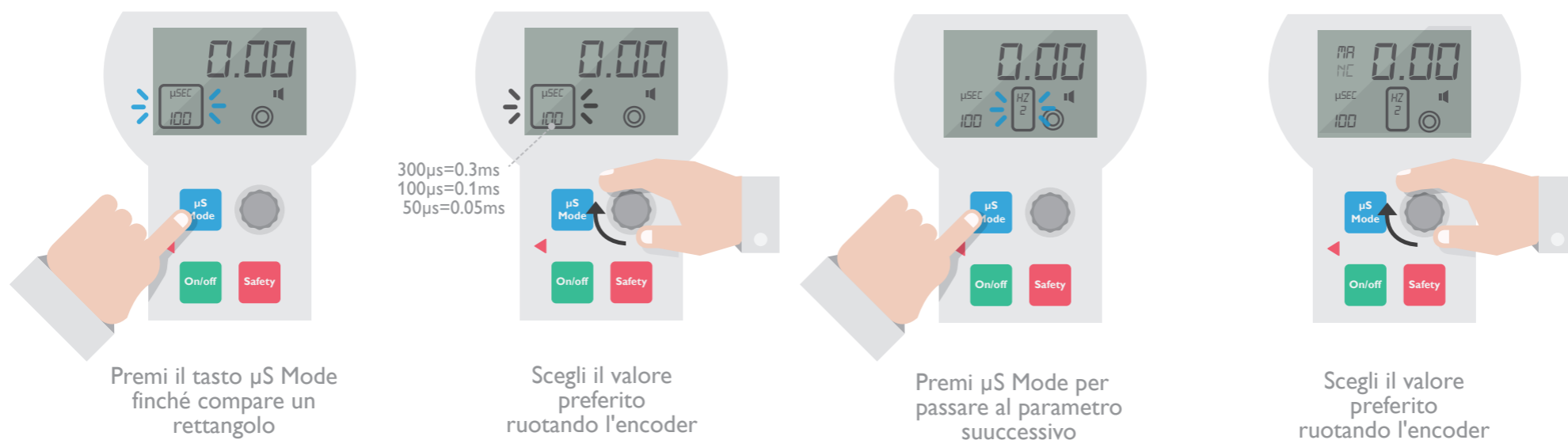

Premi il tasto μ S Mode finché compare un rettangolo

$300\mu\text{s}=0.3\text{ms}$
 $100\mu\text{s}=0.1\text{ms}$
 $50\mu\text{s}=0.05\text{ms}$

Scegli il valore preferito ruotando l'encoder

Premi μ S Mode per passare al parametro successivo

Scegli il valore preferito ruotando l'encoder

Intensità


Ruota l'encoder



Assicurati che il suono sia attivo

Problemi?

Premere il tasto Safety per interrompere la stimolazione

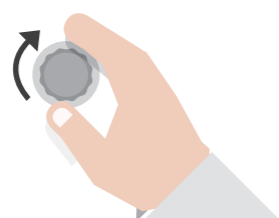

VYGN

Value Life