

# CPAP DI BOUSSIGNAC



## USO STANDARD CON OSSIGENO

- Collegare la maschera alla CPAP e connettere il tubo verde alla fonte di O<sub>2</sub>.
- Posizionare la maschera e iniziare la terapia.
- Collegare il manometro alla CPAP tramite il tubo in dotazione.
- Aumentare il flusso fino a raggiungere la pressione desiderata.

**Aria o O<sub>2</sub>**




## USO CON MISCELA ARIA E O<sub>2</sub> DALLA VIA PRINCIPALE

- Collegare la maschera alla CPAP.
- Connettere il tubo verde alla miscela di ARIA e O<sub>2</sub>.
- Posizionare la maschera e iniziare la terapia.
- Collegare il manometro alla CPAP tramite il tubo in dotazione.
- Erogare il flusso di ARIA e O<sub>2</sub> in base ai litri indicati nel regolo in dotazione (tabella scorrevole) per ottenere sia la PEEP che la FiO<sub>2</sub> desiderata.

**Aria**

**O<sub>2</sub>**

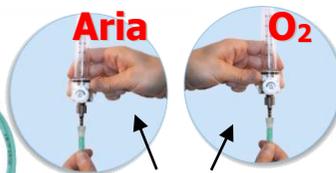

## USO CON ARIA DALLA VIA PRINCIPALE E O<sub>2</sub> DALLA VIA AUSILIARIA

- Collegare la maschera alla CPAP.
- Connettere il tubo verde alla sorgente di ARIA e la via ausiliaria all' O<sub>2</sub>.
- Posizionare la maschera e iniziare ad erogare il flusso di ARIA e O<sub>2</sub> in base ai litri indicati nel regolo in dotazione (tabella fissa sul retro) per ottenere sia la PEEP che la FiO<sub>2</sub> desiderata.

**O<sub>2</sub>**

**Aria**



## USO CON NEBULIZZATORE

- Collegare la maschera al nebulizzatore.
- Collegare la CPAP al nebulizzatore.
- Collegare il tubo verde della CPAP al miscelatore ARIA/O<sub>2</sub> e l'ingresso del nebulizzatore ad un'altra fonte di gas (aria o O<sub>2</sub>).
- Iniziare la terapia fino ad ottenere la PEEP, la FiO<sub>2</sub>, e la nebulizzazione desiderata.

**Aria o O<sub>2</sub>**

**Aria o O<sub>2</sub>**



Utilizzare il REGOLO in dotazione per la regolazione della PEEP e della FiO<sub>2</sub>